

IMAGEnet™ R4


眼科診療支援システム



Hospital Information System

病院情報システムとのシームレスな連携。

病院情報システム (HIS) との連携が可能です。新規構築・既存システム問わず、様々な医療情報システムとのデータ連携が可能です。患者属性情報からファイリングへの登録だけでなく、検査結果を添付したレポートの送信まで IMAGEnet™ R4 がサポートします。

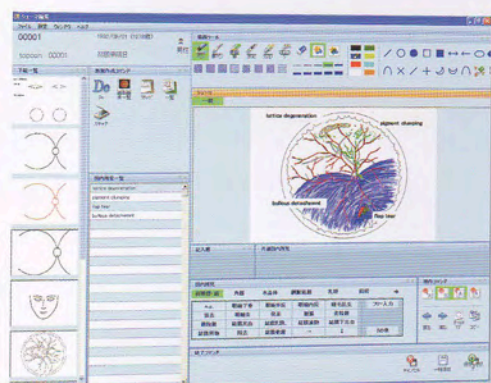

シェーマ機能※

IMAGEnet™ R4 上で利用可能な多彩なシェーマ下絵をご用意。液晶ペンタブレットを利用してスケッチすることも可能です。またシェーマ図をレポートに貼り付け 病院情報システム (HIS) に送信することも可能です。

※オプションソフトウェアです



HISレポート


IMAGEnet™ R4 上でユーザー様の必要とする情報をレポートにして 病院情報システム (HIS) へ送信することが可能です。これにより HIS 端末から眼科データを閲覧することが可能です。




Consultation Room

多彩な画像処理ツールで診断を強力サポート。


診断をサポートする画像処理ツールを豊富に搭載しています。任意の部位の拡大や強調、比較ツールなどを駆使することで効率的な診断に貢献し、また学会資料の作成等にも役立てる事ができます。

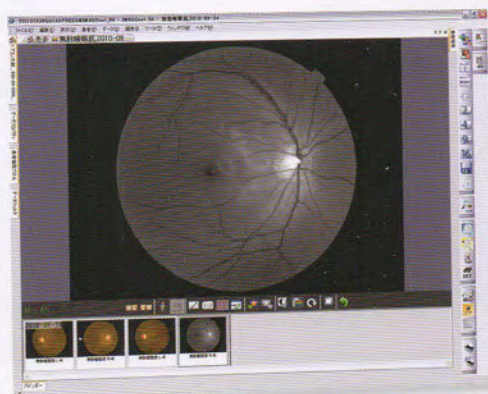


デジタルレッドフリー※

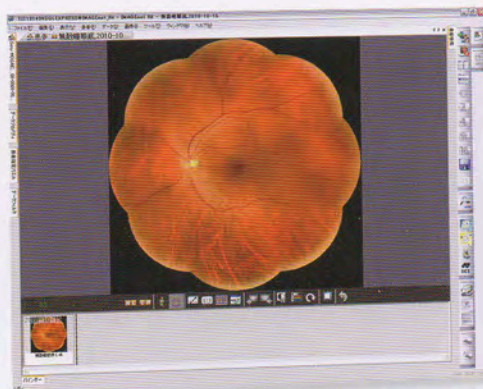


パノラマ

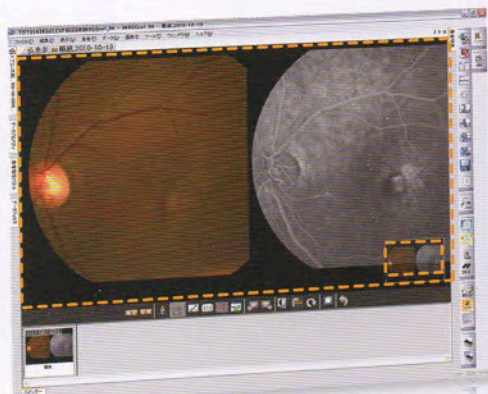

Quick 2 up

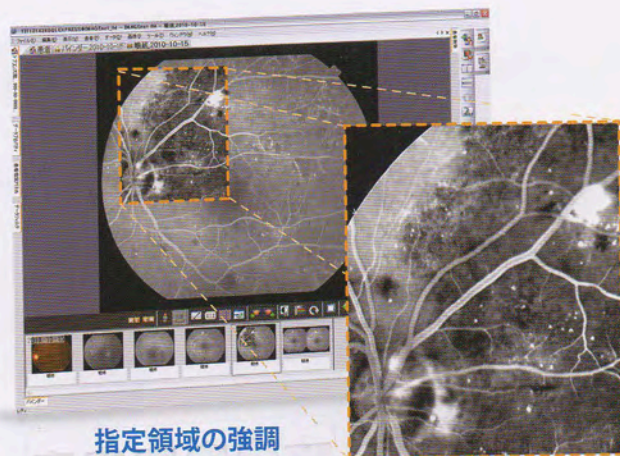

指定領域の強調

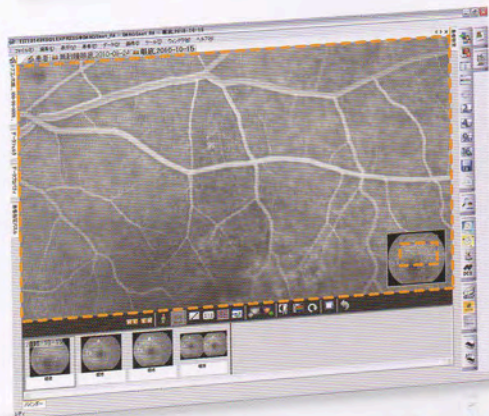

ズーム


※撮影した画像を画像処理し擬似的にレッドフリー画像を表示するデジタルレッドフリーです



VA Test Room & Exam nat on Room

スムーズでかんたんな患者データ登録。 検査データと患者氏名・IDをリンク。

病院の情報システムと接続することによりレセプトコンピュータやオーダーリングシステムから患者属性情報の取得が可能です。検査情報登録も手入力の手間もほとんどなくスピーディな診療に貢献します。

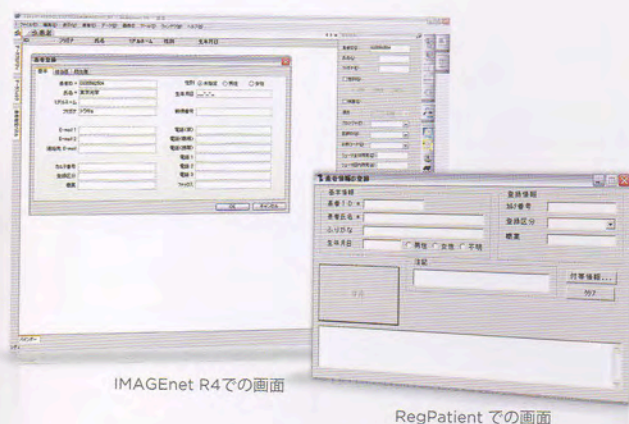

IMAGEnet R4での画面

RegPatient での画面


患者データのかんたん登録

病院の情報システムと接続しレセプトコンピュータやオーダーリングシステムから患者属性情報を取得できます。病院情報システム (HIS) で登録した患者情報を常時チェックし IMAGEnet R4 に反映させるバーコードリーダやカードリーダを使用することで患者氏名 ID の誤入力の防止や、入力の手間を大幅に軽減します。



検査データをサーバーへ登録


他覚検査は検査機器に接続されたカードリーダ バーコードリーダから患者 ID を入力。検査後プリントボタンを押すだけでデータをサーバーに自動転送します。

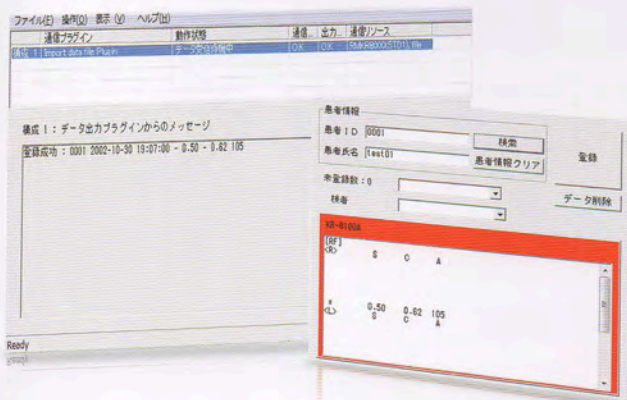

自覚検査データもかんたん入力※

当日に検査したレフデータ ケラトデータなどを検査テンプレートへ取り込むことができ 自覚視力測定時に参照出来ます。また、様々な自覚検査を入力するための検査テンプレートをオプションソフトウェアとしてラインアップしており 自覚視力検査や色覚検査などの検査結果を入力できます。数値データの入力はテンキーやタッチパネル操作で行い、データの登録もワンクリックでかんたんに行えます。

※自覚検査データを入力するには別売ソフトウェア RegData が必要です

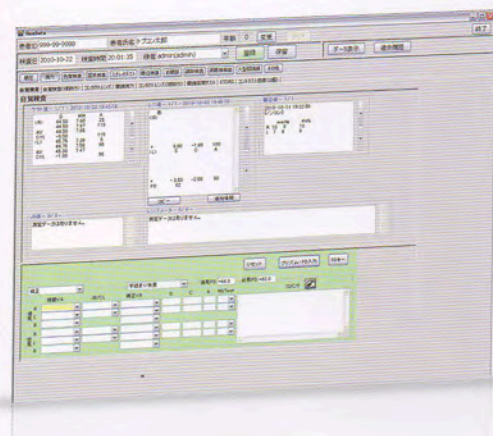

暗室
&
レーザー手術室



mag ng Room & Operation Room & Laser Treatment Room


ダイレクトな撮影画像の取り込みで 撮影効率 & 診療効率を大幅 UP。

診断で使用するあらゆるデータを検査ごとに保存。見たいデータをすぐに見ることができます。眼底カメラからの画像もダイレクトに取り込み、暗室でのスムーズな撮影をサポートします。




眼底画像やスリットランプ画像の取り込み

撮影機器ごとにキャプチャソフトを備え、より快適な撮影操作をサポートします。眼底カメラ本体でフィルタを変えるだけで撮影ソフトも自動で撮影モードを切り替えスムーズな撮影が行えます。スリットランプ撮影では、左右眼自動検知機能が搭載されており撮影画像に左右眼の情報が入力されます。

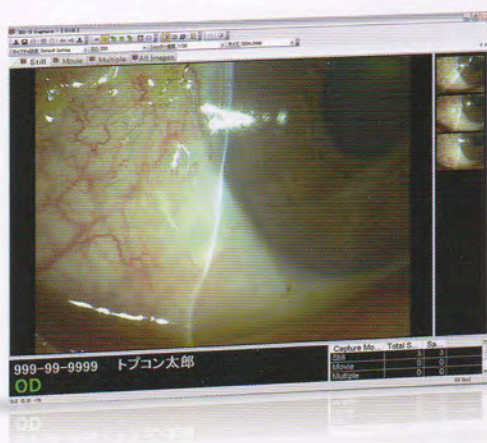

GP Viewer


視野計データを IMAGEnet に取り込むと、左右眼、日付で分けて見やすく表示します。経時変化を見るのに大変有効です。

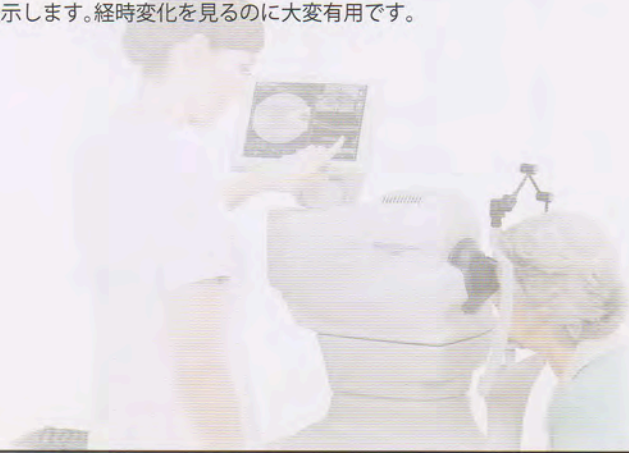

Consultation Room


画期的。直感的な操作で気になる画像をバインダーへかんたん保存。

見たい画像に簡単アクセス。スムーズな検索で診療効率の向上とストレスを感じさせない診療フローを強力にサポートします。

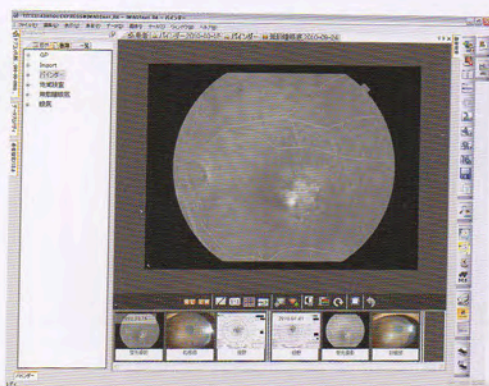


バインダー機能

撮影結果から気になる画像をバインダーに保存することで、見たい画像にすぐにアクセスすることができます。また、撮影日でソートして経時変化をわかりやすく捉えるのに大変便利な機能です。

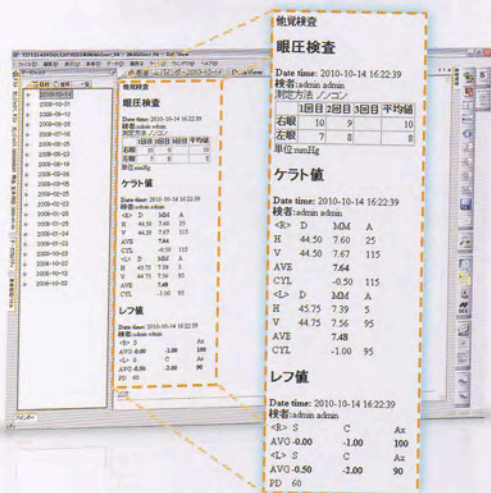

多彩なData View

RegData で入力した検査データを IMAGEnet™ R4 上で一覧で表示することが可能です。患者を指定した後に日付をクリックすると最初に立ち上がり、一目で検査した日の数値データを把握できます。

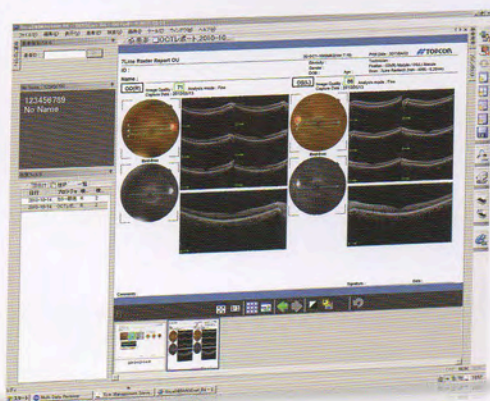

OCT Viewerとの連携※


IMAGEnet™ R4 から簡単に OCT viewer を起動でき、スムーズな連携が可能です。

※OCT Viewer は 3 次元眼底像撮影装置 3D OCT-1000, 3D OCT-2000, 3D OCT-1 Maestro の付属品・解析用ソフトウェアです。



システムチャート

眼科におけるすべての診療を包括的にサポート。トプコンの機器だけでなく他社製品との接続も可能です。

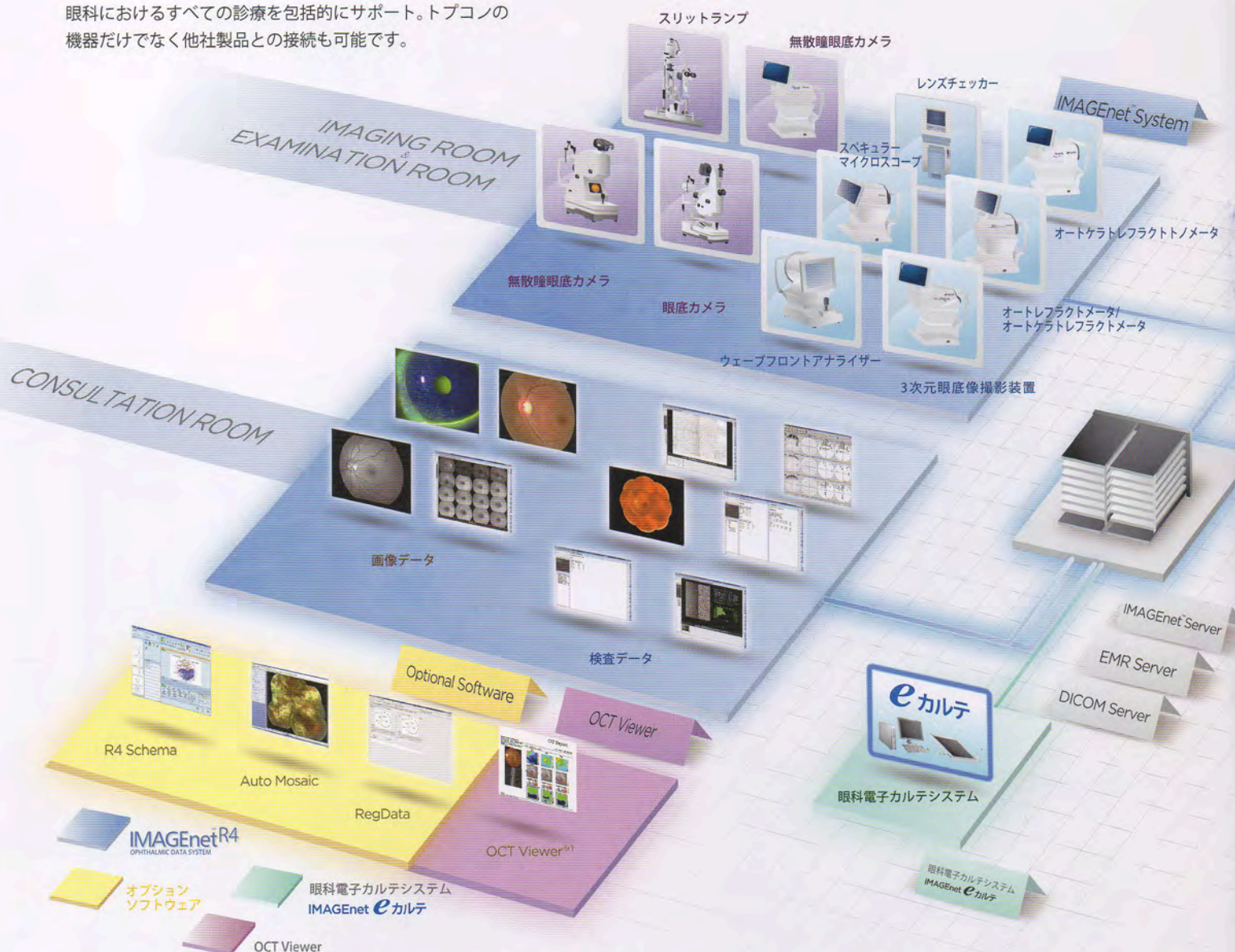

※1 OCT Viewerは3次元眼底像撮影装置3D OCT 1000, 3D OCT-2000, 3D OCT 1 Maestroの付属品 解析用ソフトウェアです。

販売名 3次元眼底像撮影装置3D OCT 1000 医療機器認証番号 218AABZX00065000
販売名 3次元眼底像撮影装置3D OCT-2000 医療機器認証番号 221AABZX00046000
販売名 3次元眼底像撮影装置3D OCT 1 医療機器認証番号 224AABZX00151000
販売名 眼科診療支援システム IMAGEnet R4 医療機器認証番号 227AABZX00082000

※画面はハメコミ合成です。

※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

株式会社トプコンメディカルジャパン

本社	〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1	TEL. (03)5915-1800	FAX. (03)5915-1805
営業本部	〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1	TEL. (03)5915-1803	FAX. (03)5915-1805
システム&サービス部	〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1	TEL. (03)5915-1803	FAX. (03)5915-1805
東京営業所	〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1	TEL. (03)6867-0123	FAX. (03)6867-0124
札幌営業所	〒060-0034 札幌市中央区北4条東2-1(岩崎ビル6F)	TEL. (011)207-3250	FAX. (011)207-3251
仙台営業所	〒980-0804 仙台市青葉区大町1-3-2 仙台MDビル1階	TEL. (022)722-0637	FAX. (022)722-0638
横浜営業所	〒224-0032 横浜市中区茅ヶ崎中央11-3ウェルネスセンタープラザ南ビル101号室	TEL. (045)949-3600	FAX. (045)949-3604
名古屋営業所	〒461-0005 名古屋市中区東区2-9-1高岳セントラルビルディング2階	TEL. (052)934-0761	FAX. (052)934-0762
大阪営業所	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-5-15進徳第六ビル2階	TEL. (06)7659-2904	FAX. (06)7659-2906
広島営業所	〒733-0013 広島市西区横川新町8-22(ラ・ドマーク横川)	TEL. (082)294-8971	FAX. (082)294-8994
松山営業所	〒791-1105 松山市北井門2-12-7(エシアンジール松山103)	TEL. (089)969-1427	FAX. (089)969-1428
福岡営業所	〒812-0042 福岡市博多区豊1丁目10-50 MR博多ビル	TEL. (092)483-3751	FAX. (092)483-3753

製造販売 株式会社トプコン ホームページ <http://www.topcon.co.jp>

本社 アイケア国内営業グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL. (03)3558-2506
(株) トプコンサービス 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 (株) トプコン内 TEL. (03)3965-5491



(株)トプコン本社



EC9711081
(株)トプコン本社

大豆インキを使用しています

© 2010-2017 株式会社トプコン
Printed in Japan 2017 09-10 KI E042-5