

器01 手術及び治療台  
一般医療機器 眼科診療・処置用椅子 15723000

## 電動患者椅子 CR-750

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構成

- (1) シート
- (2) スリーブ
- (3) ベースカバー
- (4) ベースプレート
- (5) リフティングコラム
- (6) フットスイッチ



#### 2. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 型装着部

#### 3. 電氣的定格

- (1) 電源電圧：AC100V - 230V
- (2) 電源周波数：50 - 60Hz

#### 4. 寸法及び重量

寸法：430mm(W) × 715mm~865mm(H) × 439mm(D)  
重量：26.5kg ± 1kg

#### 5. 作動・動作原理

電動モータでスピンドルを回転させ、チェーン駆動によって上下させる。

### 【使用目的又は効果】

本器は診察時に患者用の椅子として使用する。  
スリットランプなどの眼科診療装置と患者の位置を合わせるため、電動昇降装置によって上下に移動させる。

### 【使用方法等】

- (1) 電源プラグをコンセントにつなぐ
- (2) UP/DOWN スイッチやフットスイッチで操作する。

### 【使用上の注意】

1. 使用前の注意
  - (1) 不安定な床で使用しない。
  - (2) 水や薬品がかかる場所で使用しない。
  - (3) コードに重いものを載せたり、挟んだりしない。
  - (4) 濡れた手で電源コードをコンセントから抜き差ししない。
  - (5) 電源コードはアース付きの壁コンセントに接続する。
  - (6) 電源プラグを差し込む壁コンセントの周りには物を置かない
  - (7) 可燃性薬品、可燃性ガス、高濃度の酸素がある場所で使用しない

#### 2. 使用中の注意

- (1) 装置にもたれかかる、つかまる、上から押さえつけるなどの行為を行わない。
- (2) 装置の隙間にクリップなどの異物を入れない。
- (3) 上下動操作を行う際は、脚などはさみ込みに注意する。

#### 3. 使用後の注意

- (1) 装置の清掃には、有機溶剤(シンナー、ベンジン、アセトン、トルエン、酢酸エチルなど)または漂白剤は使用しない。
- (2) 装置の清掃をするときは、電源プラグをコンセントから抜く。
- (3) 装置を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。
- (4) 装置が故障した場合、他者が間違えて使用することがないように「故障中のため使用を禁止する」旨の表示を行うこと。

#### 4. その他の注意

- (1) 装置に、発煙、異臭、異常音などが発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、弊社代理店またはタカギセイコー営業部へ連絡する。
- (2) 装置が故障した場合、タカギセイコーが認定した修理作業員以外には修理を行わない。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管環境

下記の条件で保管すること。

- 温度：-20～+60℃  
相対湿度：10～95% (結露のないこと)  
気圧：700～1060hPa

#### 2. 耐用期間

適切な使用を行った場合に限り、8年  
[自己認証(当社データ)による]

#### 3. 保管

- (1) 水のかからない場所に保管する。
- (2) 気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。
- (3) 傾斜、振動、衝撃等がない安定した場所に保管する。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 日常の手入れ

- (1) 清掃は柔らかい布で乾拭きしてください。  
汚れがひどいときには薄めた中性洗剤をしみ込ませ、硬く絞った布で拭く。その後、乾拭きを行う。

#### 2. 取扱業者による保守点検

- (1) 1項の使用者による保守点検と同等の内容
- (2) 装置の機能、性能に関する保守点検は取扱業者では行わず製造販売業者へ連絡をしてください。

取扱説明書を必ずご参照ください

**【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者

株式会社タカギセイコー

〒383-8585 長野県中野市岩船 330-2

TEL 0269-22-4511

製造業者

株式会社タカギセイコー

取扱説明書を必ずご参照ください