

プログラム 1 疾病診断用プログラム
管理医療機器 眼撮影装置用プログラム（16419012）
/眼底カメラ用プログラム（10551012）
「眼科診療支援システム IMAGEnet R4」の構成品
オートモザイクソフトウェア（AutoMosaic）

【形状・構造及び原理等】

「眼科診療支援システム IMAGEnet R4」の添付文書を参照のこと。

【使用目的又は効果】

眼撮影装置、眼底カメラから提供された情報をさらに処理し情報を診断のために提供する。

【使用方法等】

本ソフトウェアは、「眼科診療支援システム IMAGEnet R4」がインストールされている汎用 IT 機器または眼科向け医療機器の構成品であるパソコン（以降「パソコン」）にインストールし、複数の眼底画像を組み合わせてパノラマ画像を作成するために使用する。

<使用準備>

1. パソコンの電源を入れる
2. 「眼科診療支援システム IMAGEnet R4」を起動する。
3. [ユーザ名]と[パスワード]を入力し、ログインする。

<操作>

1. 患者 ID を入力し、患者を選択する。
2. 選択した患者の画像のうち、組み合わせて表示したい複数の眼底画像を選択する。
3. メニューバーの [ツール] - [AutoMosaic] をクリックし、本ソフトウェアを起動する。自動で画像を配置してパノラマ画像が作成される。

<終了>

1. 画面上の [Finish] ボタンをクリックして本プログラムを終了する。
2. [保存] ボタンをクリックしてパノラマ画像をパソコンに保存する。
3. 「眼科診療支援システム IMAGEnet R4」を終了する。

詳細は「眼科診療支援システム IMAGEnet R4」取扱説明書の「AutoMosaic」を参照のこと。

【使用上の注意】

「眼科診療支援システム IMAGEnet R4」の添付文書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 トプコン
TEL 03-3558-2506