


機械器具01 手術台及び治療台

一般医療機器 汎用診断・処置用テーブル JMDN13958009

ツインポール電動光学台 K-1462

* 【形状、構造及び原理等】

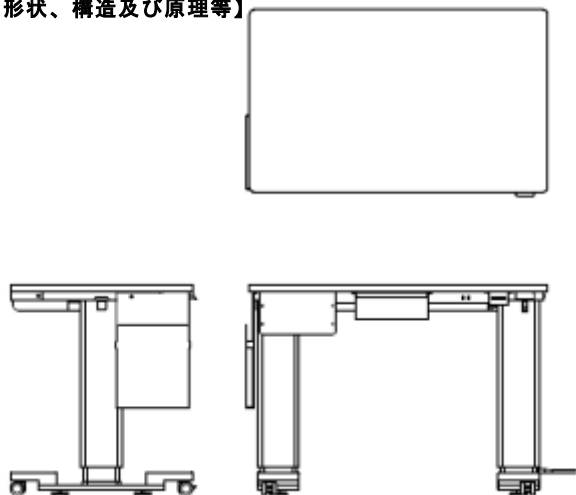

1. 構成

- 1) 本体
- 2) 電源コード
- 3) ヒューズ 2本
- 4) 添付文書
- 5) 取扱説明書

2. 電氣的定格

電源電圧 AC100V 50/60Hz
消費電力 1200W (内コンセント400W)

3. 寸法及び質量

外形寸法 幅900mm×高さ635mm～885mm×奥行き550mm
質量 58kg

* 4. 品目仕様

- 1) テーブル高さ
 - (1) 最低高さ 635mm
 - (2) 最高高さ 885mm
- 2) ストローク 250mm
- 3) 最大搭載重量 80kg
- 4) 連続運転 150秒以内

* 【使用目的又は効果】

* 眼科の診断及び処置等に用いる一般用テーブル。

* 【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 電源コードを接続し、電源スイッチを入れる。
- 2) テーブルの上に検査装置を設置する。
- 3) 上下動スイッチにより、患者に対してテーブルを最適な高さにしてから検査を行う。

2. 使用環境

温度範囲 +10℃～+40℃
湿度範囲 30%～75%
気圧範囲 700hPa～1060hPa

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 重量物なので移動作業等は、十分注意し危険が無いように行うこと。
- 2) 安定した場所で使用すること。
- 3) 不安定な場所に放置しないこと。
- 4) 本体が汚れたときはカラ拭きを行うこと。汚れのひどい時は、少量の水か中性洗剤を使って拭くこと。有機溶剤は使用しないこと。

2. 廃棄

廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

* 【保管方法及び使用期間等】

1. 保管環境条件

温度範囲 -10℃～+55℃
湿度範囲 10%～95%
気圧範囲 700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管

- 1) 使用後は綺麗に拭いて、安定した場所に保管すること。
- 2) 気圧・温度・湿度・風通し・日光・ほこり・塩分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所、及び水のかからない場所に、納入時の包装状態で保管すること。

3. 使用期限

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから10年(自己認証による)

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 東和
住 所 長野県中野市大字中野1698-2
電話番号 0269-22-5181

製造業者 株式会社 東和

* 【販売業者（販売店）】



取扱説明書を必ずご参照下さい