

機械器具 (22) 検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ (35299000)
「コンプレクション CV-5000」の付属品
パネルチャート PC-50SB

**【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、パネルチャート PC-50SBのみで構成される。



2. 電氣的定格

電源電圧: 交流 100-240V

周波数: 50-60Hz

電源入力: 135VA

3. 寸法: 460 mm(W) × 65 mm(D) × 392 mm(H)

4. 使用環境

温度: 10°C~40°C

湿度: 30%~90% (結露なきこと)

気圧: 700hPa~1060hPa

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」を参照のこと。

**【使用目的又は効果】

PC外付CV用電源ユニットに接続したパソコンまたはPC内蔵CV用電源ユニットが出力する視力検査用視標データを表示し、視機能検査用視力表として用いる。

**【使用方法等】

詳細はコンプレクションCV-5000の「取扱説明書」の「各部の名称とその働き」、本品の「取扱説明書」の「各部の名称」、「使うための準備」を参照のこと。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本体を壁に取り付ける場合には、構成品の壁掛け金具を用い、質量を支えることができる丈夫な壁に取り付けること (石膏ボードの壁には取り付けないこと)。

[本体が落下し、故障したり、負傷する恐れがあります。]

構成品の壁掛け金具は、向きに注意して壁に固定すること。

[本体が落下し、故障したり、負傷する恐れがあります。]

本体の検査距離の設定を、正しく設定すること。

[測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。]

液晶ディスプレイに傷が付いたり、指紋、ホコリ、その他で汚れないように注意すること。

[測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。]

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

その他本品の「取扱説明書」の「使用上の注意」を熟読し、遵守すること。

**【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 本体の検査距離の設定が正しいことを確認すること。
2. 本体が壁または付属品のフロアスタンドに、確実に取り付けられていることを確認すること。
3. しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
4. 液晶ディスプレイが汚れたときには清掃すること。
5. 使用しないときには、ダストカバーを被せること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「使うための準備」、「管理と点検」を参照のこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい