

機械器具01 手術台及び治療台
 一般医療機器 汎用診断・処置用テーブル 13958009

電動光学台 ST-26T

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

テーブル
 デスクスイッチ
 リフティングコラム
 脚
 電源プラグ
 アウトレット



2. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器
 電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 型装着部

3. 電氣的定格

本体

電源電圧：AC100-240V
 電源周波数：50-60Hz

4. 寸法及び重量

寸法：604(W)×550(D)×560~860(H)
 重量：20.2kg

5. 作動・動作原理

電動でアクチュエータを動作し、テーブルを昇降させる。

【使用目的又は効果】

眼科検査器械を載せ、昇降により検査器械を検査に適した高さに調整する事を目的とする。

【使用方法等】

- (1)電源プラグをコンセントにつなぐ。
- (2)デスクスイッチの▽△を押し続ける事でテーブルの昇降を行なう。

【使用上の注意】

1. 使用前の注意

- ・不安定な床で使用しない。
- ・水や薬品がかかる場所で使用しない。
- ・コードに重いものを載せたり、挟んだりしない。
- ・濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
- ・電源プラグはアース付きのコンセントにつなぐ。
- ・電源プラグは製造銘板に表示されている電圧と周波数の条件に合うコンセントにつなぎ、使用する。
- ・可燃性薬品、可燃性ガス、高濃度の酸素がある場所で使用しない。

2. 使用中の注意

- ・装置にもたれかかる、つかまる、上から押さえつけるなどの行為を行わない。
- ・接触可能なコネクタ部分と被検者に同時に触れない。
- ・装置には指定された機器以外を接続しない。

3. その他の注意

装置に、発煙、異臭、異常音などが発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて電源を切り、弊社代理店またはタカギセイコー営業部へ連絡する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

下記の条件で保管すること。
 温度：-10～+55℃
 相対湿度：10～95% (結露のないこと)
 気圧：700～1060hPa

2. 耐用期間

適切な使用を行った場合に限り、8年
 [自己認証(当社データ)による]

3. 保管

- ・水のかからない場所に保管する。
- ・気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。
- ・傾斜、振動、衝撃等がない安定した場所に保管する。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常の手入れ

- ・ヒューズ切れの確認および交換の際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。
- ・ヒューズは必ず指定されたものを使用してください。
- ・清掃は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときには、薄めた中性洗剤をしみこませ硬く絞った布で拭き、その後乾拭きしてください。

2. 取扱い業者による保守点検

- ・使用者による保守点検事項と同等の内容
- ・装置の機能、性能に関する保守点検は取扱い業者では行わず製造販売業者へ連絡をしてください。

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
 株式会社タカギセイコー
 製造業者
 株式会社タカギセイコー

取扱説明書を必ずご参照ください