

+

AC+AS

スライディングテーブル [タクタス]



使いやすさを超えた、直感的スイッチ

各スイッチには人間工学を考慮した操作しやすいサイズ及びレイアウトを採用。特に、最もよく使用するテーブルトップのIN/OUT、UP/DOWNのスイッチは、「引き出す」「持ち上げる」など日常生活においてすでに手が慣れている直感的な操作を目指し、試行錯誤の末に完成した自信のデザインです。また、カスタムファンクションスイッチにIN/OUTもしくはUP/DOWNを割り当てることで、従来型のプッシュボタンによる操作も行うことができます。



※この配置は左引き仕様です。




「日常の動き」でスムーズな操作

テーブルトップのOUTには「引き出す」、またINには「押す」アクションをスイッチングに活かし、無駄のない操作を実現しました。UP/DOWNもそれぞれ「上げる」「下げる」という直感的な動作によってコントロールできます。


ワイドテーブルトップ

テーブルトップの寸法 (D: 865mm x W: 400mm) は肘のせ台や処置小物などを配置する十分なスペースを確保します。ケアテーブルのアクセサリースペースにはくぼみを設け、スライド時にテーブル上の小物が滑り落ちることを防ぎます。

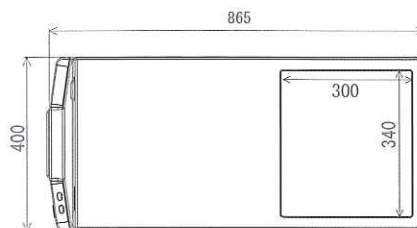

オート / 手引きの使い分け

オートと手引きを自在に使い分けることが可能な機構を採用しています。自然な操作感はそのままに、様々なケースに柔軟に対応することができます。手引きでテーブルトップを引き出す場合は任意の場所で固定し、スリットランプの検査をすることが可能です。

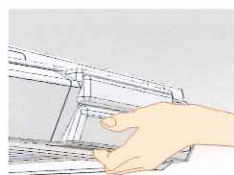

アクセサリボックス

従来機に比べ、収納力が大幅にアップしたアクセサリボックスにはスリットランプのアクセサリなどを入れることができます。さらに CCD カメラ (L-0777)、背景照明の本体部などを設置することもできます。



室内照明・スリットランプ点灯位置の選択

テーブルトップ OUT 時のスリットランプ点灯位置をあらかじめ設定された4つのパターン (室内照明 2 パターン、スリット点灯 2 パターン) から選択することができます。

スライド・昇降スピード調整機能

テーブルトップのスライド及び昇降のスピードを自在に調節することが可能です。例えば、診察数が多い場合にはスピードを速める、また高齢の患者様が多い場合には遅く設定するなど、状況に合わせて調節ができます。

彩りのある診療空間



COORDINA

イナミの「選べる108色」-コルディナ-

タクタスシリーズは、108色の個性豊かなカラーバリエーションが自慢のコルディナに対応しています。診療施設のイメージやレイアウトに合わせた、一步先行く空間マネジメントをぜひお試しください。



イメージカラーNo. L-2754

カラーリング例

アーバンモトーン



シック

都会的

落ち着いた

イメージカラーNo. L-2751

パステルピンク



フェミニン

かわいさ

キッズ

イメージカラーNo. L-2712

ポップシトラス



キッズ

明るさ

楽しさ

イメージカラーNo. L-2692

右引き / 左引きの両タイプに対応

診療施設のレイアウトを選ばない右引き / 左引き兼用仕様を採用しているため、さらに自由な空間設計が可能です。スイッチパネルは右引き / 左引きの各レイアウトに合わせて、テーブルトップの左右どちらにでも設置できる機構となっています。

※標準では、左引き仕様となっています。

すっきり配線収納

患者椅子の接続コードはテーブル下を通しすっきりと収納することができます。また CCD カメラ (L-0777) のケーブルもテーブルトップに収納することができるため、安全面、見た目の両方に優れています。





製品仕様表

K-1700 スライディングテーブル タクタス K-1700S スライディングテーブル タクタス
エクストラデザイン

テーブル寸法	D: 865mm x W: 400mm	
最低地上高	665mm	692mm
最高地上高	945mm	972mm
上下ストローク	280mm	
スライdstローク	500mm	
クアテーブル	オプション	標準装備
クアテーブル寸法	D: 830mm x W: 400mm x H: 27mm	
クアテーブルスライド幅	80mm	
検眼鏡(1本タイプ)	オプション	オプション
検眼鏡(2本タイプ)	オプション	標準装備
モニターアーム	オプション	標準装備
カスタムファンクションスイッチ	オプション	標準装備
標準カラー	L-2739	
最大荷重	30kg	
重量	99kg	113kg
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	150VA	200VA


※K-1700Sの地上高はクアテーブルの高さ27mmを含んでおります。

オプション

K-1700-CT	K-1700専用クアテーブル
K-1700-PKK1	K-1700専用検眼鏡ボックス1本タイプ
K-1700-PKK2	K-1700専用検眼鏡ボックス2本タイプ
K-1700-PMD	K-1700専用モニターポール(ジョイント付)
K-17A	K-1700専用カスタムファンクションスイッチ
K-1800DB	K-1800専用リバティス発信機
K-0777-FB	K-1700専用3CCDカメラ専用カメラ
K-1471B	K-1471カメラ/1471Sカメラ用移動ケーブル
K-1700-PH5	K-1700専用スリット調光ボリューム
K-1700-PH6	K-1700専用室内照明連動用メタコン

スリットランプ取付けキット

K-1700-PH1	K-1700専用スリットランプ
K-1700-PH2	K-1700専用メカ純正トラフ/取付キット
K-1700-PH3	あご台取付金具
K-1700-PH4	K-1700専用端子台(7端子)
K-1700-PH10	K-1700専用レグス社900BQ-BM取付キット
K-1700-PH11	K-1700専用レグス社LED取付キット
K-1700-PH13	K-1700専用レグス社SL120/130取付キット
K-1700-PH15	K-1700専用レグス社RO5000取付キット
K-1700-PH17	K-1700専用トロン社取付キット
K-1700-PH21	K-1700専用レグス社取付キットL-0229-E用
K-1700-PH22	K-1700専用レグス社取付キットL-0229ST用
K-1700-PH23	K-1700専用レグス社取付キットCF取付用
L-0229-BJ	スリットランプ取付ベース あご台一体型 タイプA
L-0329-BJ	スリットランプ取付ベース あご台一体型 タイプB

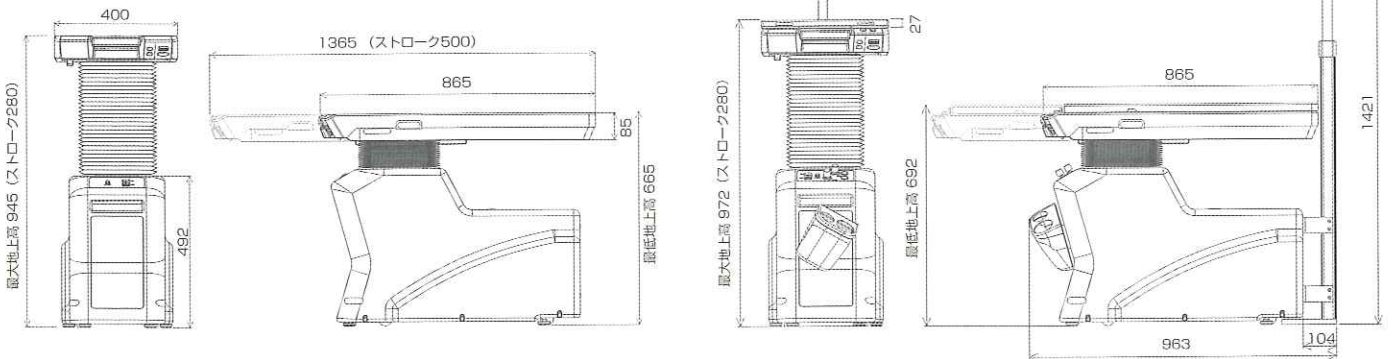

製造販売業許可番号 13B1X00048

※本カタログ中のスリットランプ、アブラネーショントノメーター、モニター、3CCDカメラ、背景照明、その他アクセサリ類は別売りです。



株式会社 イナミ
A Passion for a Nice View



このカタログは、風力で発電されたグリーン電力にて
刷版を出力、印刷されています。
※当カタログの刷版出力に必要な電力量を0.9kWh、5,000部を印刷するのに
必要な電力量を76kWhと計算しています



本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市中区栄3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18コムール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。